

川村バケットシーティングシステム

# 座いすフレーム取扱説明書

医師・理学療法士・使用者向け

この度は、弊社の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みいただき、製品を正しく安全にお使いください。  
お読みになられた後は、保証書とともに大切に保管し、必要に応じくりかえしお読みください。



# もくじ

---

1. 安全にご使用いただくために .....	P 3
2. 各部の名称 .....	P 4
3. ご使用前の点検・準備 .....	P 4
4. 座いすフレーム 使用方法	
バケットシート本体を座いすフレームへ取り付ける方法 .....	P 5~6
スライドU字バーの調整方法 .....	P 6
5. 日常のお手入れ .....	P 7
6. 廃棄方法 .....	P 7
7. 保証とアフターサービス .....	P 7

# 1. 安全にご使用いただくために



## 警告

誤った使い方をしたときに、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 医師・理学療法士の指導のもと調整を行ってください。
- 座いすフレーム本体にバケットシート本体を取り付け、又は外すときは、使用者が降りている状態で行ってください。
- 本製品をご使用になる場合は、必ず介助者同伴のもと、ご使用ください。
- 介助者は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで、ご使用にならないでください。
- 本製品は、室内の使用を目的にしていますので、室外での使用はできません。
- 介助者はバケットシート本体が座いすフレームに固定されているかどうか確認してください。固定が不完全なまま使用すると、バケットシート本体が座いすフレームから外れて怪我をする恐れがあります。
- 使用者をバケットシート本体などに座らせた状態で、座いすフレーム本体を持たないでください。座いすフレーム本体が破損したり、使用者が座いすフレーム本体から落下して怪我をする恐れがあります。
- 使用時に身体を乗り出す等しないでください。転倒する恐れがあります。
- 本製品を無断で修理、改造、調整しないでください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 自動車内での座いすフレーム本体のご使用はおやめください。本製品は衝突や事故などから使用者を守るためのものではありません。
- 踏台や脚立のかわりに使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- 自動車内での本製品のご使用はおやめください。本製品は衝突や事故などから乗車者を守るためのものではありません。
- 本製品に破損・異常が発生していないか、ご使用前には必ず各部を点検してください。万一、破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社までご連絡ください。
- 本製品を他の方へ転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。



## 注意


誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物理的損害の発生が想定される内容を示します。

- 座いすフレーム本体にバケットシート本体を取り付け、又は外すとき、指などを挟まないように注意してください。
- 介助者は座いすフレーム本体を持つ時は必ず両手で持ってください。座いすフレーム本体が破損する恐れがあります。
- 本製品は常温で使用、保管してください。（特に夏季の自動車の中など、高温で直射日光の当たる場所や、暖房器具の前に放置しないでください。）

- ・ 本書中の図や写真は一部を省略または抽象化した表現になっているものがあります。
  - ・ 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場所があります。
- 不明な事柄については弊社までお問い合わせください。

## 2. 各部の名称

---

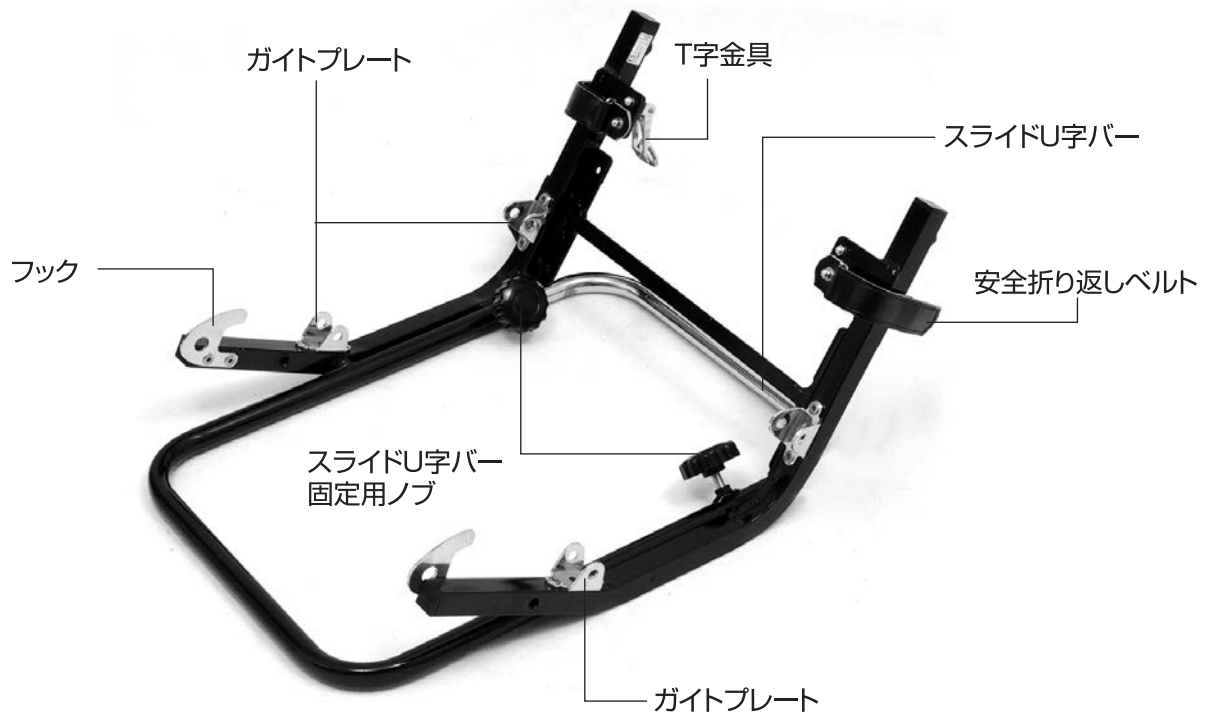

※バケットシート本体や車椅子フレーム、座いすフレームなどについては専用の取扱説明書をお読みください。

## 3. ご使用前の点検・準備

---

ご使用前にまず下記の点検を行ってください。

- スライドU字バー固定用ノブは締まっていますか
- 安全折り返しベルトがはがれていませんか
- 座いす用フレームにバケットシート本体\*が確実に固定されていますか  
(※バケットシート本体に関しては専用取扱説明書をお読みください)
- スライドU字バーの点検
- 大きなひずみや損傷はありませんか
- 大きなガタツキがなくスムーズにスライドしますか

万一破損や異常を発見した場合はそのまま使用せず、必ず弊社にご連絡ください。

# 4. 座いすフレーム 使用方法

## バケットシート本体を座いすフレームへ取り付ける方法



1



2




3




**注意**

座いすフレーム本体にバケットシート本体などを取り付け、又は外す時には指をはさんだり、怪我をしないように十分気をつけて行ってください。

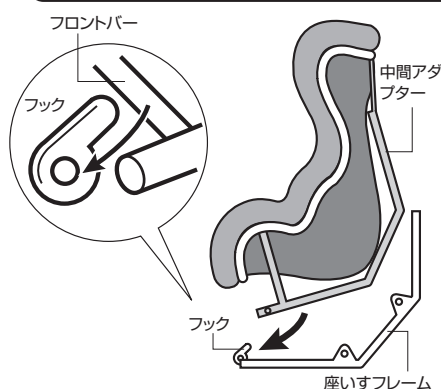

バケットシート本体のフロントバーを座いすフレームのフックに差し込みます。

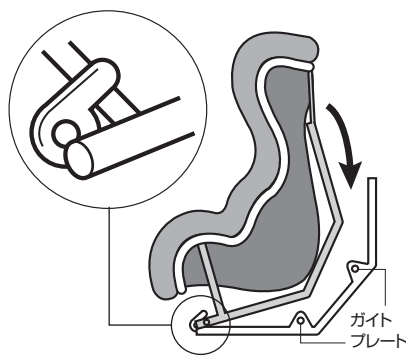


バケットシート本体を上図のようにフレームのガイドプレートに差し込みます。



バケットシート本体が上図のようにフレームのガイドプレートにしっかり差し込まれているか確認します。

4

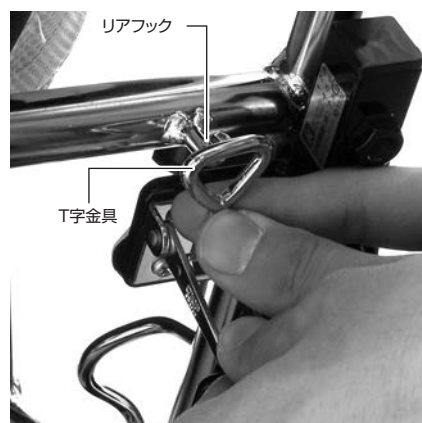

座いすフレーム背面のT字金具をバケットシート本体のリアフックにかけます（左右共）。


5



T字金具が「パッチン」と音がするまで閉じます。

6

固定できない場合は「反時計回り」固定力が弱い場合は「時計回り」の方向へそれぞれ回して調整してください。

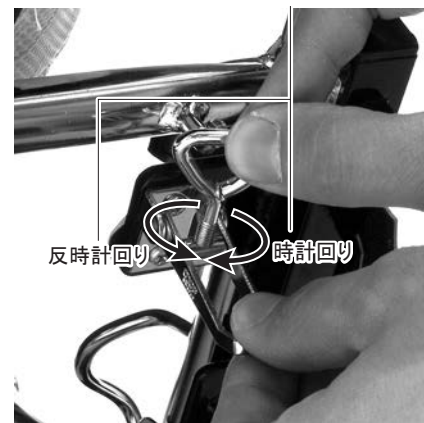

T字金具の固定力が弱かったり、固定できない場合は上写真のようにT字金具のつまみを回して固定力を調整してください。






## 注意

使用者はバケットシート本体が各種フレームに固定されているかどうか確認してください。固定が不完全なまま使用すると、バケットシート本体が座いすフレームから外れて怪我をする恐れがあります。

### 7

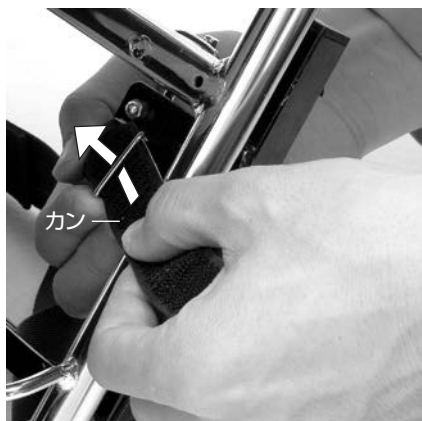

座いすフレーム背面にあるカンに安全折り返しベルトを通します。

### 8



カンに通し、折り曲げて引っ張り、固定します。

### 9



バケットシート本体が座いすフレームにしっかりと固定されているか左右共確認します。

※バケットシート本体を座いす用フレームから外す方法は①～⑨の逆に行ってください。  
(5～6ページ)


## スライドU字バーの調整方法



## 注意


スライドU字バーのスライド時、指はさみに注意してください。

### 1

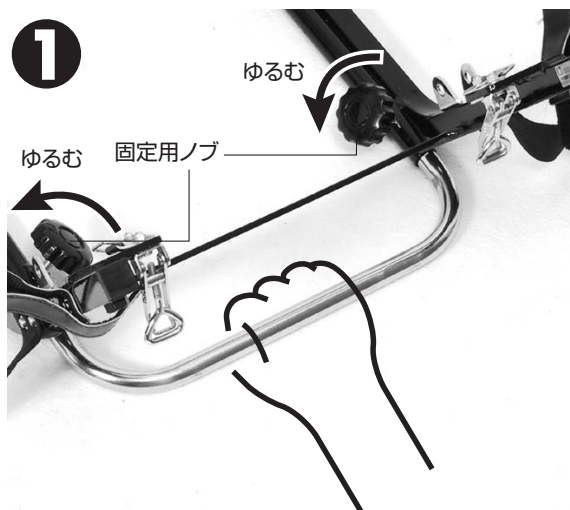

スライドU字バー固定用ノブをゆるめます。

### 2

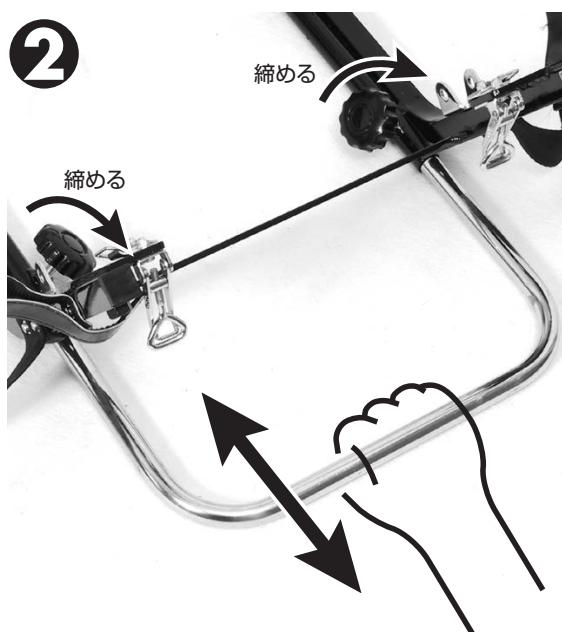

後方転倒しなくなるまでスライドU字バーの長さを調整した後、スライドU字バー固定用ノブを締め、しっかり固定されていることを確認します。

# 5. 日常のお手入れ

---

- 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤は使用しないでください。

# 6. 廃棄方法

---

各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

(主材料)

座いすフレーム	(フレーム) スチール
---------	-------------

# 7. 保証とアフターサービス

---

## **保証期間中は**

保証書の記載内容に基づき修理させていただきます。

## **保証期間経過後の修理は**

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。