


# 頭部保護帽取扱注意書

装着者用

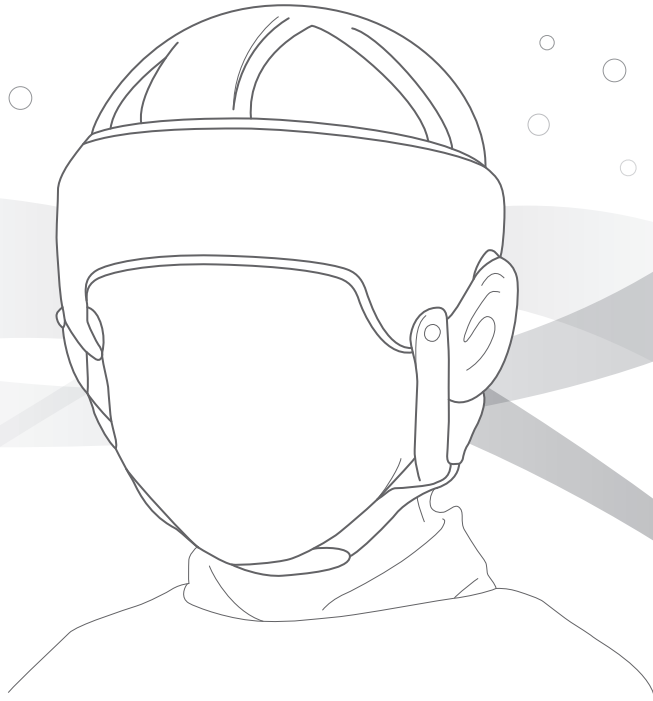

この度は、弊社の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
取扱注意書をよくお読みいただき、製品を正しく安全にお使いください。  
お読みになられた後は、保証書とともに大切に保管し、必要に応じて  
くりかえしお読みください。

# 1. 安全にご使用いただくために



## 警告

誤った使い方をしたときに、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 必ず医師等の指示に従って使用してください。
- 本製品を無断で修理、改造、調整しないでください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 本製品に破損・異常が発生していないか、ご使用前には必ず各部を点検してください。  
万一、破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社までご連絡ください。
- 本製品を他の方への転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 装着部に発赤やかぶれ、痛みが生じた場合、直ちに医師の指導を受けてください。
- 不適合が生じた場合や変形、磨耗、異音が生じた場合など、製品の異常は、身体を傷つけることがありますので、異常を発見した場合は、直ちに弊社までご連絡ください。
- 製品の機能操作は確実に行ってください。（特に継手部分の固定、解除の際には確実に操作してください。）
- 装着の際は、ベルト、紐等により適切な締め付けを行い、正しい位置を保持してください。



## 注意

誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 装着や使用の際、継手等の可動部分で体の一部や衣服等を挟んだりして傷つける場合がありますので取り扱いには注意してください。
- 本製品は常温で使用、保管してください。（特に夏季の自動車の中など、高温で直射日光の当たる場所や、暖房器具の前に放置しないでください。）

お願い

### 面ファスナーを

(マジックテープ・クイックロン、等)

しっかり押さえてご使用ください。

○面ファスナーはしっかり押さえる事で装着されています。

△不十分な場合、接着力が得られず危険です。

○ご使用の際は、しっかり押さえて(圧力をかけて)下さい。



KAWAMURA

### コルセット・補装具 装着時の カイロ (貼るカイロ等温熱剤) の 取扱いについての注意点



カイロ等温熱剤は、直接コルセット・補装具に貼らないようお願いします。



金属部分（筋金部分）やプラスチック部分と身体との密着度が高い場所には、特に貼らないようお願いします。



カイロ等どうしてもご使用される場合は、上記の事を守り、安全には十分注意をしてご使用ください。

## 2. 日常のお手入れ方法

汗をかいたり、製品が濡れたときは、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。マジックベルトの粘着力が低下している場合は、安全のため交換が必要となりますので弊社までご連絡ください。なお、毛玉等が付着した場合は、つまようじなどをマジックベルトの表面に滑らせて取り除いてください。

製品のお肌に触れる部分は常に清潔にしてください。お肌に触れるクッション部分(布や革)の汚れがひどい場合は、ぬるま湯で湿らせた布などを押し当ててふき取ってください。

金属やプラスチック部分の汚れがひどい場合は、ぬるま湯で湿らせた布などでふき取ってください。

### 洗えるヘルメットの場合(他の製品は洗濯できません)



- 洗濯ネットに入れて洗濯機で洗ってください。(水流は弱)
- 洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。
- 色落ちする場合がありますので他の衣類と一緒に洗わないでください。
- お湯は使用にならずに水で洗濯してください。
- 乾燥機は使用せずに陰干ししてください。

## 3. 廃棄方法

各自自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

## 4. 保証とアフターサービス

### 保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。詳しくは弊社係員へご相談ください。

## 修理ご相談窓口

製品の修理のご相談は、最寄りのお客さま窓口までお電話ください。(巻末記載)